

Mund-Nase-Masken

wiederverwendbare 2-Lagen Baumwolle Behelfs-Masken

WONNEBERGER
MANUFAKTUR

MADE IN SAXONY

Material



Material: Mischgewebe

Garn: 100% Polyester

Nasenklipp: Polyester-ummanteltes Metall

- vor dem ersten Tragen waschen
- nicht bleichen oder reinigen lassen
- nicht bügeln
- nicht in den Trockner legen
- max 95°C im Waschbeutel waschen
- **Empfehlung: Masken mit Nasenbügel**
Abkochen & Handwäsche im
Laugenbad für längere Haltbarkeit

Besonderheiten

- Atemluft wird durch 2 dehnbare Baumwollschichten gefiltert
- eingearbeiteter Metallstreifen am Nasenrücken
- Maske dichtet Nase und Mund ab
- ergonomische Maskenform, die nicht an Nase und Ohren reibt
- hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“

Fachgerechte Tragweise

Damit die Maske straff am Gesicht anliegt, kann sie bei Erwachsenen am Nacken und oberen Hinterkopf verschnürt werden. Bei den Kindermasken müssen die Bänder um die Ohren getragen werden. Dazu verknoten Sie die Bänder bitte auf die gewünschte Länge zu einem geschlossenen Kreis für jedes Ohr und schneiden die überstehende Länge ab.

Wichtig ist, dass der Nasenklipp komplett den Nasenrücken umschließt, sodass keine Atemluft mehr seitlich der Nase entweichen kann. Die Maske bestenfalls stündlich wechseln. (Ärzt Häuser benutzen täglich ca. 5 Masken pro Mitarbeiter & haben daher 10 Masken pro Person vorrätig, um 5 Masken pro Tag waschen zu können)

Mund-Nase Maske Kids

Achtung, Strangulierungsgefahr für Kinder. Die Bänder für die Kindermasken dürfen nicht hinter dem Kopf verschnürt werden. Sie müssen hinter den Ohren verknotet werden. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Masken spielen.

Hinweise

Die BWM4 von der Wonneberger-Manufaktur ist eine textile Behelfsmaske, **kein zertifizierter Mundschutz und hat auch keine anderen Zertifizierungen.** Sie schützt nur bedingt vor Ansteckung. Ihr eigentlicher Zweck ist es, den Atem des Trägers zu filtern und Tröpfchen-Ausbreitungen zu minimieren. (Daher muss die Maske fachgerecht getragen werden, um das Austreten von Viren und Bakterien durch Tröpfchen zu minimieren.)



BWM4
Unisize für
Erwachsene



**BWM4
KIDS**
Kinder ab 7 Jahre

Mund-Nase-Masken

wiederverwendbare 2-Lagen Baumwoll Behelfs-Masken

**WONNEBERGER
MANUFAKTUR**

MADE IN SAXONY

Material



Material: Mischgewebe

Garn: 100% Polyester

Nasenklipp: Polyester-ummanteltes Metall

- vor dem ersten Tragen waschen
- nicht bleichen oder reinigen lassen
- nicht bügeln
- nicht in den Trockner legen
- max 70°C im Waschbeutel waschen
- **Empfehlung: Masken mit Nasenbügel
Abkochen & Handwäsche im
Laugenbad für längere Haltbarkeit**

Besonderheiten

- Atemluft wird durch 2 dehnbare Textilschichten gefiltert
- eingearbeiteter Metallstreifen am Nasenrücken
- Maske dichtet Nase und Mund ab
- ergonomische Maskenform, die nicht an Nase und Ohren reibt
- hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“

Fachgerechte Tragweise

Damit die Maske straff am Gesicht anliegt, kann sie bei Erwachsenen am Nacken und oberen Hinterkopf verschnürt werden. Bei den Kindermasken müssen die Bänder um die Ohren getragen werden. Dazu verknoten Sie die Bänder bitte auf die gewünschte Länge zu einem geschlossenen Kreis für jedes Ohr und schneiden die überstehende Länge ab.

Wichtig ist, dass der Nasenklipp komplett den Nasenrücken umschließt, sodass keine Atemluft mehr seitlich der Nase entweichen kann. Die Maske bestenfalls stündlich wechseln. (Arzthäuser benutzen täglich ca. 5 Masken pro Mitarbeiter & haben daher 10 Masken pro Person vorrätig, um 5 Masken pro Tag waschen zu können)

Mund-Nase Maske Kids

Achtung, Strangulierungsgefahr für Kinder. Die Bänder für die Kindermasken dürfen nicht hinter dem Kopf verschnürt werden. Sie müssen hinter den Ohren verknotet werden. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt mit den Masken spielen.

Hinweise

Die BMW4 von der Wonneberger-Manufaktur ist eine textile Behelfsmaske, **kein zertifizierter Mundschutz und hat auch keine anderen Zertifizierungen.** Sie schützt nur bedingt vor Ansteckung. Ihr eigentlicher Zweck ist es, den Atem des Trägers zu filtern und Tröpfchen-Ausbreitungen zu minimieren. (Daher muss die Maske fachgerecht getragen werden, um das Austreten von Viren und Bakterien durch Tröpfchen zu minimieren.)



BWM4
Unisize für
Erwachsene



**BWM4
KIDS**
Kinder ab 7 Jahre

Mund-Nase-Maske

lockere Masken mit Gummischlaufen und Nasenbügel

**WONNEBERGER
MANUFAKTUR**

MADE IN SAXONY

Besonderheiten

- 2-Lagen Coolmax® oder Baumwolle
- Schlaufen um die Ohren oder hinter den Kopf legen je nach Ausführung
- sehr leichtes Atmen
- Coolmax® transportiert Schweiß nach Außen & kühlt
- Baumwolle verträgt Kochwäsche und ist angenehm
- hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“

Benutzerhinweise

Die M5-Maske von der Wonneberger Manufaktur ist eine textile Behelfsmaske und als Erwachsenen und Kindergröße erhältlich. Es ist **kein zertifizierter Mundschutz und hat auch keine anderen Zertifizierungen**. Sein Zweck ist es, den Atem des Trägers abzufangen und Tröpfchen-Ausbreitungen zu minimieren.

Fachgerechte Tragweise

Damit die Maske gut am Gesicht anliegt, müssen die Gummibänder am Nacken und oberen Hinterkopf oder um die Ohren straffgezogen werden. Falls die Bänder zu lang sind, kann mit einem Knoten die Länge variiert werden. Der Nasenbügel kann individuell so gebogen werden, dass keine Luft nach oben entweicht und so das Beschlagen von Brillengläsern verhindert werden kann.

Coolmax



Coolmax: 100% Polyester
Garn: 100% Polyester
Bänder: Gummi

- vor dem ersten Tragen im Wäschebeutel waschen

Baumwolle



Baumwolle: 95%, 5% Elasthan
Garn: 100% Polyester
Bänder: Polyesterband

- vor dem ersten Tragen im Wäschebeutel waschen



Mund-Nase-Schal

Filternder Schal mit Gummikordel und Nasenbügel

**WONNEBERGER
MANUFAKTUR**

MADE IN SAXONY

Besonderheiten

- neongelber aus Coolmax® gewirkter Schal
- warnend im Straßenverkehr
- 3 Lagen Mundteil minimiert Tröpfchen-Verbreitung
- sehr leichtes Atmen
- Coolmax® transportiert Schweiß nach Außen
- Coolmax® kühlt die Haut im Sommer & wärmt im Herbst
- kann auch als normaler Loop getragen werden
- hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“

Benutzerhinweise

Die LoopMask von der Wonneberger Manufaktur ist eine textile Behelfsmaske und gleichzeitig ein angenehmer Schal für die Übergangszeit. Es ist **kein zertifizierter Mundschutz und hat auch keine anderen Zertifizierungen**. Es schützt nur bedingt vor Ansteckung. Sein eigentlicher Zweck ist es, den Atem des Trägers abzufangen und Tröpfchen-Ausbreitungen zu minimieren.

Fachgerechte Tragweise

Damit der Schal gut am Gesicht anliegt, muss sein Gummiband am Nacken oder oberen Hinterkopf straff gezogen werden. Ein schnelles Wechseln zwischen Mund-Nase-Schal und Alltagsschal macht ihn so attraktiv.

Material



Coolmax: 100% Polyester

Garn: 100% Polyester

Kordel: Gummi und Polyester

- vor dem ersten Tragen waschen
- 70°C Schonwäsche im Wäschebeutel



**CXLoop
Coolmax®**

Mund-Nase-Schal

Filternder Schal mit Gummikordel und Nasenbügel

**WONNEBERGER
MANUFAKTUR**

MADE IN SAXONY

Besonderheiten

- luftiger, weicher und feiner Schal
- Nasenbügel verhindert das Beschlagen der Brillengläser
- 2 Lagen Mundteil/ filter aus Coolmax®
- sehr leichtes Atmen
- Coolmax® transportiert Flüssigkeit nach Außen
- Kordelband zum Feststellen des Schals am Gesicht
- kann auch als normaler Loop getragen werden
- hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“

Benutzerhinweise

Die LoopMask von der Wonneberger Manufaktur ist eine textile Behelfsmaske und gleichzeitig ein angenehmer Schal für die Übergangszeit. Es ist **kein zertifizierter Mundschutz und hat auch keine anderen Zertifizierungen**. Es schützt nur bedingt vor Ansteckung. Sein eigentlicher Zweck ist es, den Atem des Trägers abzufangen und Tröpfchen-Ausbreitungen zu minimieren.

Fachgerechte Tragweise

Damit der Schal gut am Gesicht anliegt, muss sein Gummiband am Nacken oder oberen Hinterkopf straff gezogen und der Nasenbügel an die Nase angepasst werden. Ein schnelles Wechseln zwischen Mund-Nase-Schal und Alltagsschal macht ihn so attraktiv.

Material



Hauptmaterial: 82% Polyester, 18% Elasthan

Coolmax-Filter: 100% Polyester

Garn: 100% Polyester

Kordel: Gummi und Polyester

- vor dem ersten Tragen waschen

- 70°C Schonwäsche im Waschbeutel

Maskenschal Loopmask



Mund-Nase-Maske

wiederverwendbare wasserabweisende Behelfs-Masken

**WONNEBERGER
MANUFAKTUR**

MADE IN SAXONY

Besonderheiten

- High-class luxus Maske
- optisch ansprechend durch mattes Schwarz
- wasserdichtes Material minimiert Tröpfchen-Verbreitung
- dichtet Nase und Mund nicht komplett ab
- sehr leichtes atmen
- ergonomische Maskenform, reibt nicht an Nase & Ohren
- mehrere Male Kochwäsche tauglich im Waschbeutel
- hochwertige Verarbeitung „Made in Germany“

Benutzerhinweise

Die 331M4 von der Wonneberger Manufaktur ist eine textile Behelfsmaske, **kein zertifizierter Mundschutz und hat auch keine anderen Zertifizierungen**. Sie schützt nur bedingt vor Ansteckung. Ihr eigentlicher Zweck ist es, den Atem des Trägers abzufangen und Tröpfchen-Ausbreitungen zu minimieren.

Fachgerechte Tragweise

Damit die Maske straff am Gesicht anliegt, muss sie am Nacken und oberen Hinterkopf verschnürt oder hinten den Ohren verknotet werden. Die Maske bestenfalls stündlich wechseln.

Material



Synlex: 43% Polyamid, 41% Polyurethan, 6% Elasthan
Garn: 100% Polyester

- vor dem ersten Tragen waschen
- 90°C bis 95°C Kochwäsche beständig
- schonend waschen im Wäschebeutel



**331M4
Synlex**